

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/blend-a-dent-extra-stark-frisch-klej-do-protez-47-g-p-69290.html>

Blend-a-dent Extra Stark Frisch Klej do Protez 47 g



Cena	19,36 zł
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	es_10784-uniw
Kod EAN	8006540314999

Opis produktu

Blend-a-dent Super-Haftcreme Extra Stark Frisch klej do protez, który zapewnia wyjątkową siłę trzymania przez cały dzień. Dzięki zaawansowanej formule, ta kremowa konsystencja idealnie przywiera do protez, zapobiegając ich przesuwaniu się, nawet w trudnych warunkach. Produkt zapewnia długotrwałą stabilność i komfort użytkowania, dzięki czemu możesz cieszyć się pełną pewnością przez cały dzień.

Blend-a-dent Extra Stark Frisch zapewnia świeży zapach i nie zmienia smaku potraw, co sprawia, że korzystanie z protez staje się przyjemniejsze i bardziej komfortowe. Wodoodporność i odporność na wstrząsy gwarantują, że protezy będą trzymały się na miejscu, niezależnie od sytuacji.

Dzięki Blend-a-dent Super-Haftcreme Extra Stark Frisch, nie musisz martwić się o komfort protez, a ich stabilność pozostaje na najwyższym poziomie. Zamów teraz i ciesz się pełną pewnością w każdej chwili!

Pojemność: 47 g

Składniki: Wapń / cynk kopolimer PVM / MA (33%), parafina płynna, guma celulozowa (20%), wazelina, krzemionka, mleczan mentylu, aromat, CI 45410, mentol, limonea

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- 1. Oczyszczyć i osuszyć protezę zębową przed nałożeniem kremu adhezyjnego.
- 2. Nałożyć krem adhezyjny zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Może być konieczne wykonanie kilku prób, aby określić odpowiednią ilość protezy.
- 3. Włożyć protezę i mocno dociśnij przez krótki czas. Jeśli krem adhezyjny wycieknie, oznacza to, że nałożyłeś go za dużo.
- 4. Aby zdjąć protezę, przepłucz usta ciepłą wodą, lekko poruszaj protezą, aż odpadnie.