

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/blend-a-dent-extra-stark-klej-do-protezy-47-g-p-24576.html>

Blend-a-dent Extra Stark Klej do Protez 47 g



Cena	17,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	es_6031-uniw
Kod EAN	8006540314913

Opis produktu

Silna przyczepność i komfort dla protez

Blend-a-dent Extra Stark to wysokiej jakości krem do protez zębowych, który gwarantuje niezawodne wsparcie przez cały dzień. Dzięki wyjątkowej formule, ten klej do protez tworzy stabilną poduszkę między dziąsłami a protezą, zapewniając komfort użytkowania nawet przy intensywnych posiłkach.

Z jego pomocą możesz cieszyć się pewnością, że Twoje protezy pozostaną na swoim miejscu, niezależnie od tego, co robisz. Blend-a-dent Extra Stark skutecznie zapobiega przedostawaniu się resztek jedzenia pod protezę, co przyczynia się do lepszego samopoczucia i higieny jamy ustnej.

Dodatkowo, lekki miętowy smak sprawia, że użytkowanie jest przyjemne i odświeżające. Blend-a-dent Extra Stark to idealny wybór dla osób, które szukają pewności i komfortu na co dzień.

Zainwestuj w swoje zdrowie jamy ustnej! Zamów Blend-a-dent Extra Stark już dziś i ciesz się wygodą noszenia protez.

Pojemność: 47 g

Składniki: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, Aroma, CI 45410, Menthol, Limonene

Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Sposób użycia: 1. Oczyszczyć i osuszyć protezę zębową przed nałożeniem kremu adhezyjnego. 2. Nałożyć krem adhezyjny zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Może być konieczne wykonanie

kilku prób, aby określić odpowiednią ilość protezy. 3. Włóż protezę i mocno dociśnij przez krótki czas. Jeśli krem adhezyjny wycieknie, oznacza to, że nałożyłeś go za dużo. 4. Aby zdjąć protezę, przepłucz usta ciepłą wodą, lekko poruszaj protezą, aż odpadnie.