

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/blend-a-dent-profesjonal-klej-do-protez-40-g-p-25067.html>

Blend-a-dent Profesjonal Klej do Protez 40 g



Cena	15,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	es_6533-uniw
Kod EAN	8001841795492

Opis produktu

Blend-a-dent Professional Adhesive Cream ogranicza ruchy i tarcie protez oraz zapewnia doskonałe uszczelnienie między protezami a dziąsłami w porównaniu z Blend-a-dent Original. Pomaga zatrzymać gromadzenie się bakterii, które mogą prowadzić do nieświeżego oddechu, a wyjątkowo cienką końcówkę dozującą ułatwia i precyzyjną aplikację.

Pojemność: 40 g

Aplikacja:

- Oczyszczyć i osuszyć protezy przed nałożeniem kremu adhezyjnego.
- Nałożyć krem przylepny zgodnie ze wskazówkami w ulotce dołączonej do opakowania. Znalezienie odpowiedniej ilości protezy może zająć kilka prób.
- Włożyć protezę i krótko mocno dociśnij. Jeśli krem adhezyjny wycieka, oznacza to, że nałożyłeś za dużo.
- Aby wyjąć protezę, wypłucz usta ciepłą wodą, delikatnie poruszaj protezą, aż odskoczy.

Składniki: kopolimer wapnia/cynku PVM/MA (35%), parafina płynna, guma celulozowa (20%), wazelina, uwodniona krzemionka, mleczan mentylu, aromat, mentol, CI 45410, BHT, tokoferol