

Corega Frisch Klej do Protez 40 g



Cena	19,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	es_4893-uniw
Kod EAN	5054563067449

Opis produktu

Corega Frisch Klej do Protez to innowacyjne rozwiązanie dla użytkowników protez dentystycznych. Krem samoprzylepny Corega Ultra Fresh nie tylko zapewnia solidne utrwalenie protezy przez cały dzień, ale również dostarcza dodatkowego odświeżenia dzięki zawartości świeżej mięty. Unikalna formuła kleju, pozbawiona cynku, gwarantuje pełną ochronę dziąseł i całkowite bezpieczeństwo dla zdrowia jamy ustnej.

Korzystanie z Corega Frisch to nie tylko pewność trwałego utrwalenia protezy, ale także uczucie świeżości, które towarzyszy przez cały dzień. Wybierz produkt, który łączy skuteczność, bezpieczeństwo i komfort, i ciesz się pewnością uśmiechu.

Zamów teraz Corega Frisch i odkryj nową jakość w codziennej pielęgnacji protez dentystycznych!

Pojemność: 40 g

Sposób użycia: Najpierw użyj niewielkiej ilości. W razie potrzeby użyj więcej. Zbyt duża ilość kremu adhezyjnego może powodować obrzęki boczne. Jeśli tak się stanie, następnym razem użyj mniej. Znalezienie odpowiedniej kwoty może zająć kilka prób. Używaj tylko raz dziennie dla bezpiecznego trzymania. Jeśli potrzebujesz użyć kremu przylepnego kilka razy dziennie, poproś dentystę o poradę. Zastosowanie: Oczyszczyć i osuszyć protezy. Nakładać małymi paskami, nie za blisko krawędzi protezy. Wyplukać usta przed założeniem protezy. Włożyć protezę, mocno docisnąć, a następnie zagryźć przez kilka sekund, aby zapewnić bezpieczne trzymanie. Usuwanie: Wyplukać usta wodą. Poluzuj protezę powoli „ruchem kołyszącym”. Usunąć pozostałości kremu adhezyjnego z protez i ust ciepłą wodą i miękką szczoteczką do zębów. Użyć Corega TABS, aby dokładnie wyczyścić protezy, a następnie dobrze spłucz je wodą

Składniki: Kopolimer wapnia / sodu PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, propyloparaben, aromat, CI 45430. Bez cynku.

