

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/corega-tabs-3-minuten-tabletki-do-czyszczenia-protezy-zebowych-66-szt-p-24063.html>



## Corega Tabs 3 Minuten Tabletki do Czyszczenia Protez Zębowych 66 szt.

Cena	<b>28,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>es_5513-uniw</b>
Kod EAN	<b>5054563091994</b>

### Opis produktu

Corega Tabs 3 minuty, tabletki czyszczące do protez zębowych. Tabletki czyszczące do protez posiadają unikalną formułę, która zabija 99,9% bakterii będących przyczyną nieświeżego oddechu w 3 minuty. Usuwają również osad, przebarwienia, a także odświeżają protezę. Czyszczenie protezy przy użyciu tabletek czyszczących Corega, jako części codziennej higieny, pomaga w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej.

Tabletki należy stosować regularnie, przynajmniej raz dziennie. Mają działanie przeciwbakteryjne i dezynfekujące. Używane zgodnie z instrukcją pomagają zapobiegać gromadzeniu się płytki bakteryjnej i chronią przed przebarwieniami. Dzięki łagodnej formule czyszczą bez rysowania powierzchni protezy.

### **Opakowanie zawiera: 66 szt.**

Sposób użycia Stosowanie 3-minutowych tabletek do czyszczenia protez zębowych Corega: Wrzucić jedną tabletkę do naczynia z ciepłą (nie gorącą) wodą, zanurzyć w niej protezę. Dopilnować, by była całkowicie zanurzona w roztworze. Pozostawić protezę w roztworze na 3 minuty. Wyczyścić protezę roztworem za pomocą szczoteczki z miękkimi włóknami. Opłucz protezę pod bieżącą wodą. Wylej pozostały roztwór. Ostrzeżenia Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.