

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/dontodent-intensiv-tabletki-do-czyszczenia-protez-128-szt-p-26802.html>



## Dontodent Intensiv Tabletki do Czyszczenia Protez 128 szt.

Cena	<b>20,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>es_8282-uniw</b>
Kod EAN	<b>4058172333828</b>

### Opis produktu

Tabletki do czyszczenia protez zębowych zapewniają higieniczne czyszczenie trzecich zębów w ciągu 15 minut i zwalczają do 99,9% bakterii. Nadają się do protez pełnych i częściowych. Aktywny tlen skutecznie usuwa plamy i płytkę nazębną – nawet w trudno dostępnych miejscach. Dla przyjemnej świeżości dzięki eukaliptusowemu smakowi.

### Opakowanie zawiera 128 szt.

Składniki: Sodium Bicarbonate, Potassium Caroate, Sodium Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Sulfate, Malic Acid, PEG-150, Citric Acid, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, PEG-90, Aroma, TAED, CI 28440, CI 42090

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci; oraz osoby starsze wymagające opieki. Używaj tylko do czyszczenia protez. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Zachowaj opakowanie ze wszystkimi ważnymi informacjami. Nie należy przyjmować tabletek. Nie pij roztworu czyszczącego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości / nietolerancji jednego lub więcej składników. Zawiera mononadsiarczan potasu. Może powodować reakcje alergiczne.

**UWAGA** Powoduje silne podrażnienie oczu. Powoduje podrażnienie skóry. Działa szkodliwie po połknięciu. Zawiera mononadsiarczan potasu (karoinian potasu). Może powodować reakcje alergiczne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Delikatnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, zdejmij wszystkie soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Jeśli wymagana jest porada lekarska, przygotuj opakowanie lub etykietę. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Należy zasięgnąć porady lekarza/zwrócić się o pomoc lekarską. Dokładnie umyć ręce po użyciu. JEŚLI SIĘ POŁKNIESZ: Jeśli źle się poczujesz, zadzwoń do POISON CONTROL CENTER / lekarza.

1. Krótco szczotkuj protezę pod czystą wodą, np. szczoteczką do protez Dontodent lub miękką szczoteczką do zębów. 2. Tabletkę należy umieścić razem z protezą, np. w pojemniku do czyszczenia Dontodent lub w szklanym słoju i napełnić ciepłą wodą (35°C), aż protezy zostaną całkowicie zakryte. Nie używaj wrzącej wody, ponieważ może to uszkodzić protezę. Po 15 minutach proces czyszczenia jest zakończony, nawet jeśli tabletką nie rozpuściła się całkowicie. 3. Dokładnie wypłucz protezę czystą wodą. Opróżnij pojemnik do czyszczenia i spłucz.