

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/dontodent-super-extra-strong-hold-klej-do-protezy-40-g-p-26828.html>



## Dontodent Super Extra Strong Hold Klej do Protez 40 g

Cena	<b>9,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>es_8308-uniw</b>
Kod EAN	<b>4058172333842</b>

### Opis produktu

Dontodent Cream Extra Strong oferuje wyjątkowo mocne utrwalenie i szybki efekt. Nadaje się do protez pełnych i częściowych. Jednocześnie zapewnia ochronę i większy komfort noszenia trzecich zębów.

### Masa netto: 40 g

Składniki: Hydrogenated Polydecene, Calcium/Sodium PVMMA Copolymer, Cellulose Gum, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Aqua, Mentha Piperita Oil, Tocopherol, Menthol, CI 77491, Limonene

1. Dokładnie wyczyść protezę tabletkami do czyszczenia protez, a następnie wysusz ją. 2. Nałóż 3-4 cienkie paski kremu samoprzylepnego na protezę. 3. Włóż protezę i naciśnij ręcznie przez kilka sekund. 4. Oczekaj 5 minut do następnego spożycia jedzenia i napojów. Jeśli pozostałości kremu samoprzylepnego pozostaną na protezie nawet po normalnym czyszczeniu, można je usunąć miękką szczoteczką do zębów i ciepłą wodą. Regularnie odwiedzaj dentystę, aby sprawdzić prawidłowe dopasowanie protezy.