

o.b. Organic Super 16 szt.



Cena	9,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	es_6276-uniw
Kod EAN	3574661618104

Opis produktu

o.b. Organic to najnowsza linia tamponów w ramach szerokiego portfolio marki o.b. Tampony o.b. Organic to połączenie certyfikowanej organicznej bawełny i niezawodnej ochrony, będąc jednocześnie przyjazne dla środowiska.

- Bez dodatku szkodliwych substancji, chloru, substancji zapachowych
- 100% certyfikowanej organicznej bawełny
- Opakowanie z papieru z recyklingu potwierdzone certyfikatem FSC
- Posiadają certyfikat Ecocert
- Hipoalergiczne

Opakowanie zawiera: 16 szt.

Na początek polecamy wybór tamponu o najniższej chłonności. Błona dziewicza ma zazwyczaj naturalny, miękki i elastyczny otwór, przez który możesz z łatwością zaaplikować tampon o.b.® (Mini lub Normal) bez jej uszkodzenia.

1. Umyj ręce. Przekręć osłonkę tamponu i usuń ją. Osłonkę wyrzuć do kosza, nie do toalety.
2. Rozwiń sznureczek i delikatnie wprowadź tampon do pochwy po łuku ku tyłowi i ku górze. Jeśli poczujesz opór, zmień delikatnie kierunek wprowadzania tamponu.
3. Kiedy tampon znajdzie się w odpowiednim miejscu, nie będziesz go czuć. Jeśli tampon jest nadal wyczuwalny, wprowadź go trochę głębiej. Po aplikacji tamponu sznureczek tamponu powinien być cały czas widoczny. Ponownie umyj ręce

Wymieniaj tampony regularnie co 4-8 godzin zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Zawsze używaj tamponu o najmniejszej chłonności odpowiadającej intensywności Twojego krwawienia.

Przed wprowadzeniem nowego tamponu zawsze upewnij się, że usunęłaś poprzedni. Zawsze pamiętaj, by usunąć ostatni tampon po zakończeniu miesiączki.

Nie używaj więcej niż jednego tamponu na raz.

Uwaga: Załączona instrukcja użycia tamponów zawiera ważne informacje dotyczące menstruacyjnego TSS, rzadkiej, ale poważnej choroby. Proszę przeczytaj ją i zachowaj ze względów bezpieczeństwa i higieny.